



GUIA ESPECIALIDADES MÉDICAS
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Mepilex® Border Post-Op



Mölnlycke®

Tecnologia Safetac®

A tecnologia Safetac® foi inventada em 1990 por um motivo - para libertar os pacientes de sofrimentos desnecessários durante sua jornada de cicatrização.

Até o momento ajudamos **milhões** de pessoas com os curativos da Tecnologia Safetac, sendo mais de **3 bilhões** de curativos com menos trauma e menos dor!



Evidências Safetac em todas as indicações , Abril 2018

Evidências



- > Mepilex Border Post-Op é comparado e superior ao Aquacel Surgical, em todos os parâmetros investigados.
- > O estudo suporta 7 dias de uso, adesão suficiente, alta satisfação clínica e paciente – também durante a reabilitação e sem nenhum dano a pele de qualquer tipo relatado



- > 71% dos pacientes não precisaram trocar o curativo na primeira semana. 94% tratados com o comparativo precisaram trocar ao menos um.
- > Nenhum dano a pele foi relatado
- > Alta satisfação clínica e do paciente



- > Com a introdução do Mepilex Border Post-Op levou a redução significativa das complicações da ferida, incluindo ISC*, de 13% para 1.5%

ESPECIALIDADES MÉDICAS

› ORTOPEDIA

- › Joelho
- › Quadril
- › Pé e Tornozelo
- › Coluna
- › Mão

› CIRURGIA CARDIOVASCULAR

› CIRURGIA PLÁSTICA

- › Estética
- › Reparadora

› CIRURGIA GERAL

› GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

› MASTOLOGIA

› ONCOLOGIA



ORTOPEDIA

Mepilex® Border Post-Op



**ORTOPEDIA**



Especialidade Joelho

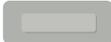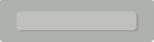Procedimento	Apresentação	Quantidade
Artroplastia Primária de Joelho	10 x 25 	1 Unidade
Artroplastia de Revisão	10 x 35 	1 a 2 unidades*
Artroscopia de joelho (Cir. Do Esporte)	6 x 8  ou 10 x 15 	3 unids ou 1 unid.

* Acompanhar a saturação do curativo

ORTOPEDIA

Especialidade Quadril

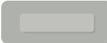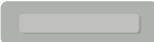
Procedimento	Apresentação	Quantidade
Artroplastia Primária de Quadril	10 x 25 	1 Unidade
Artroplastia de Revisão de Quadril	10 x 35 	1 a 2 unidades*
Fratura de Quadril	10 x 25 	1 Unidade

* Acompanhar a saturação do curativo

ORTOPEDIA

Especialidade Pé e Tornozelo

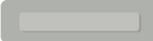


Procedimento	Apresentação	Quantidade
Trauma / Fraturas	Tamanhos variados, dependendo da complexidade da cirurgia - 6x8 cm / 10x20cm	1 Unidade
Tenorrafia de Aquiles	10 x 35 	1 a 2 unidades*
Correção de Hálux Valgus	6 x 8 	1 Unidade
Amputação	Tamanhos variados, dependendo do nível da amputação - 6x8 cm / 10x35cm	1 a 2 unidades*

* Acompanhar a saturação do curativo

ORTOPEDIA

Especialidade Coluna

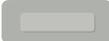

Procedimento	Apresentação	Quantidade
Trauma / Fraturas	Tamanhos variados, dependendo da complexidade da cirurgia 10x20 ao 10x30cm	1 Unidade
Cir. Hérnia de Disco (aberta)	10 x 25 	1 a 2 unidades*
Cir. Hérnia de Disco (minimamente invasiva)	6 x 8 	1 Unidade
Correção de Escoliose	10 x 15 	1 a 2 unid* cada
	10 x 35 	

* Acompanhar a saturação do curativo

ORTOPEDIA

Especialidade Cirurgia da Mão



Procedimento	Apresentação	Quantidade
Trauma / Fratura	6 x 8  até 10 x 15 	1 Unidade
Túnel de Carpo	6 x 8 	1 Unidade
Microcirurgia Reconstructiva	Tamanho variado	1 a 4 unids (p/15 dias)


CIRURGIA
CARDIOVASCULAR







Mepilex® Border Post-Op



CIRURGIA CARDIOVASCULAR

Cardíaca

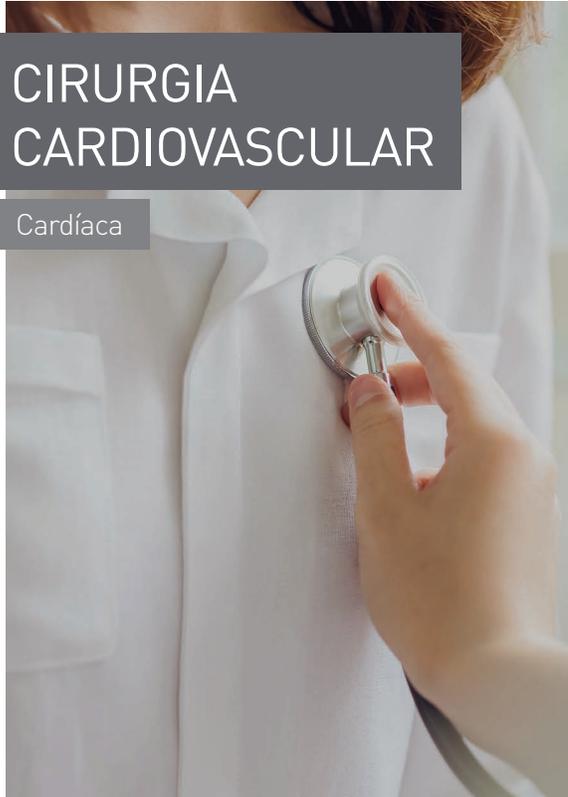

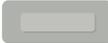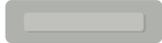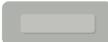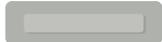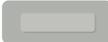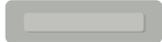Procedimento	Apresentação	Quantidade
Revascularização do miocárdio	10 x 25  até 10 x 35 	1 Unidade
Safenectomia	10 x 25  e 10 x 35 	2 unids de cada
Doenças Valvares / Congênitas / Transplante Cardíaco	10 x 25  até 10 x 35 	1 a 2 unids
Implante de Marca-passo	9 x 10  ou 10 x 15 	1 a 4 unids (p/15 dias)
Cardíaca Neonatologia	6 x 8  ou 9 x 10 	1 a 4 unids (p/15 dias)

CIRURGIA PLÁSTICA

Mepilex® Border Post-Op



CIRURGIA PLÁSTICA

Estética




Procedimento	Apresentação	Quantidade
Mamoplastia aumento (Prótese)	9 x 10 	2 unids. (cirurgia bilateral)
Mamoplastia Redutora (T invertido)	10 x 20  e/até 10 x 35 	2 unids. cada
Abdominoplastia	10 x 20  e/até 10 x 35 	2 unids cada tamanho
Lipoaspiração	6 x 8 	3 a 4 unids – dependendo da quantidade de inserção da cânula
Lifiting de coxa / braço	10 x 20  e/até 10 x 35 	2 unids cada tamanho por membro

CIRURGIA PLÁSTICA

Reparadora

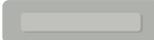

Procedimento	Apresentação	Quantidade
Reconstrução de Mama (área doadora do retalho grande dorsal e/ou TRAM)	10 x 20  até 10 x 30 	1 unidade
Abdominoplastia em âncora (pós-gastroplastia redutora)	10 x 35 	3 unids. Por aplicação (2 aplicações no mínimo)
Retalhos	Tamanhos variados, dependendo da complexidade do retalho	2 a 4 unids – dependendo da extensão (multiplicar por 2 para quantidade total)





CIRURGIA GERAL

Mepilex® Border Post-Op



CIRURGIA GERAL

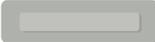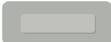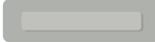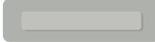

Procedimento	Apresentação	Quantidade
Cirurgias Abertas Abdominais: <ul style="list-style-type: none"> > Laparotomia Exploratória > Apendicectomia > Colectomia > Colostomia > Duodenopancreatectomia > Enterectomia > Esplenectomia > Gastrectomia > Gastrostomia > Ileostomia 	10 x 35  10 x 25  10 x 15 	1 unid, que pode varia o tamanho, de forma convencional 10x25cm a 10x35cm serão os mais utilizados.
Cirurgias por vídeo Abdominais: <ul style="list-style-type: none"> > Apendicectomia > Colectomia > Enterectomia > Esplenectomia > Gastroplastia redutora 	6 x 8  e 10 x 15 	3 unids e 1 unid. Em casos com retirada de peças podendo varia até o 10x20cm
Herniorrafias	10 x 15  até 10 x 35 	1 unid, variados casos
Transplante	10 x 15  até 10 x 35 	2 unids p/ 15dias



GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Mepilex[®] Border Post-Op



GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

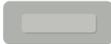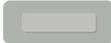


Procedimento	Apresentação	Quantidade
Cesárea	10 x 20  até 10 x 25 	1 unidade
Cirurgias Gineco-Oncológicas:		
Abertas	10 x 15  até 10 x 25 	1 a 2 unids.
Videos	6 x 8  e 10 x 15 	3 unids e 1 unid, devido a retirada de peça




MASTOLOGIA

Mepilex[®] Border Post-Op



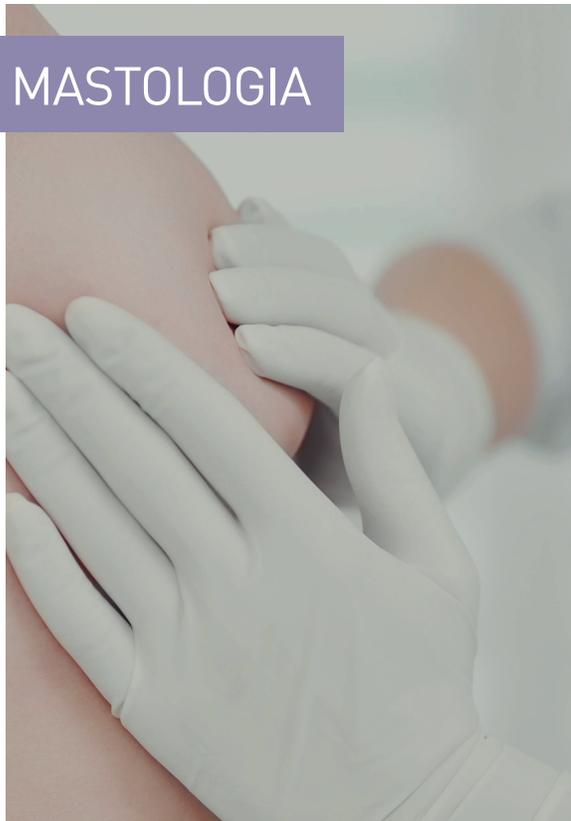

MASTOLOGIA

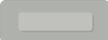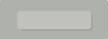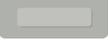Procedimento	Apresentação	Quantidade
Mastectomia s/ esvaziamento axilar	10 x 25 	1 unidade
Mastectomia c/ esvaziamento	9 x 10  e 10 x 25 	1 unid. de cada
Oncoplastia de Mama em UM tempo	9 x 10  até 10 x 25 	3 unids ou 1 unid.
Reconstrução Grande Dorsal ou TRAM	10 x 20  até 10 x 30 	1 unids


ONCOLOGIA

Mepilex® Border Post-Op




ONCOLOGIA

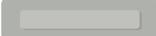

Procedimento	Apresentação	Quantidade
Cirurgias Oncológicas	6 x 8  até 10 x 35 	1 unid a 2 unids.
Colocação de Port-A-Cath	6 x 8  até 10 x 15 	1 unid.


Tamanho do Pad de Absorção

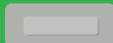Código	Tamanho	Tamanho Pad (Almofada)	
496100	6 x 8 cm	3 x 5 cm	
496200	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm	
496300	10 x 15 cm	4,5 x 10 cm	
496405	10 x 20 cm	4,5 x 14,5 cm	
496455	10 x 25 cm	4,5 x 19,5 cm	
496605	10 x 30 cm	4,5 x 24 cm	
496650	10 x 35 cm	4,5 x 29 cm	

Registro ANVISA: 80733280010

Guia para recorte do Mepilex® Border Post-Op

1

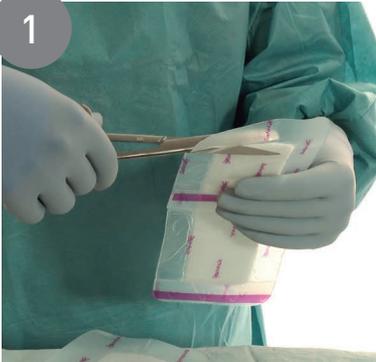

Aplique o curativo Mepilex® Border Post-Op na ferida cirúrgica.

2



Corte uma das bordas do Mepilex® Border Post-Op próximo ao PAD do curativo

3



O curativo Mepilex® Border Post-Op foi aplicado corretamente, mantendo assim sua integridade e benefícios

4




Aplique o segundo curativo Mepilex® Border Post-Op cobrindo o primeiro curativo já aplicado na ferida cirúrgica

Indicativo de Troca de Curativo Mepilex® Border Post-Op

Não Precisa Trocar

Observe

Troque o curativo

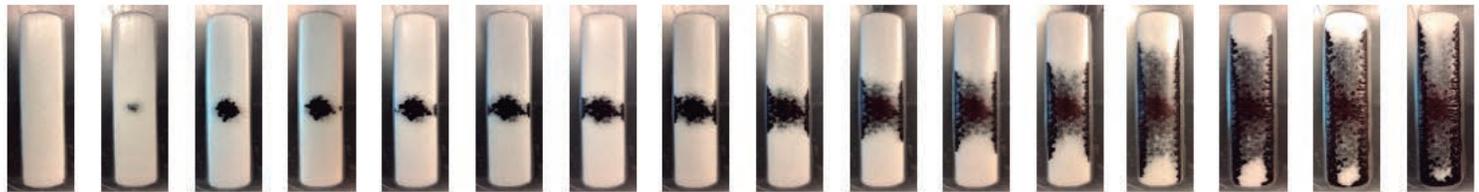

Característica do Produto

Design do curativo com corte flexível

Interface Safetac

Alta capacidade de absorção e retenção

Benefícios do Produto

Torna o curativo flexível e confortável

Minimiza os danos à pele

Reduz o número de troca de curativos

Resultado

Suporta a mobilização precoce

Ajuda a reduzir os riscos de ISC* – Evidências clínicas

Custo efetividade

Apoiar a alta precoce e melhorar a qualidade de vida dos pacientes

Reduz os custos totais



Mepilex® Border Post-Op

