

Setopress®

Cuidados de uso e reaplicação

A atadura de alta compressão Setopress® é utilizada no tratamento de úlceras venosas e condições associadas que requerem compressão graduada nos membros inferiores.

1. O Setopress® deve ser lavado suavemente à mão. Não lave ou seque o curativo em máquina de lavar ou secadora. Não utilize alvejantes, nem utilize ferro de passar.
2. Preencha o recordatório abaixo para ajudá-lo a acompanhar a higienização de suas ataduras e substituição.
3. Despreze seu curativo e utilize um novo, quando seu recordatório estiver cheio.

Lavagem	Data	Lavado (check)
1		
2		
3		
4		
5		

Anotações especiais:

Setopress® é um curativo de alta compressão que fornece compressão graduada no gerenciamento das úlceras venosas.

Em caso de dúvidas ou alterações em sua ferida, consulte um profissional de saúde.

Instruções de lavagem



O látex da borracha natural não é um componente do Setopress ou de sua embalagem.

Registro ANVISA: 80733280025

Saiba mais em: www.molnlycke.com.br

Mölnlycke Health Care Brasil
Mölnlycke Health Care Venda de Produtos Médicos Ltda.
Rua Castilho, 392 - Cj. 122 | CEP 04568-010 | São Paulo - SP - Brasil
Telefone Comercial: (11) 3016-8900
E-mail: atendimento.brasil@molnlycke.com | www.molnlycke.com.br

