

Setopress®

Bandagem suave de alta compressão



Setopress® é uma bandagem de alta compressão que fornece compressão graduada no gerenciamento das úlceras venosas.

Como o Setopress® atua?

Setopress® é uma bandagem suave de alta compressão que possibilita dois níveis diferentes de compressão (30mmHg e 40mmHg). Para garantir a aplicação correta, Setopress® possui um guia visual simples impresso no próprio produto. O guia visual consiste em retângulos coloridos que se tornam quadrados quando a extensão correta é atingida.

Ao estender os retângulos marrons até se tornarem quadrados, Setopress® fornece uma compressão de 40mmHg no tornozelo. E ao estender os retângulos verdes para forma de quadrados, fornece 30mmHg no tornozelo. Quando aplicado corretamente, a bandagem de alta compressão Setopress® produz um nível de compressão que tem evidenciado uma cicatrização eficaz até mesmo em úlceras crônicas de pernas dentro de 12 semanas².

Se um paciente não está acostumado à terapia de compressão ou encontra dificuldade em aderir o tratamento, a compressão moderada pode ser usada inicialmente.

Benefícios do Setopress®

- É suave o suficiente para ser usado com sapatos, e incentivar a mobilidade
- É lavável; o que o torna higiênico e econômico
- Possui 3,5m de comprimento (não estendido) – podendo ser utilizado em membros maiores
- Possui um guia de aplicação visual
- Possui 2 níveis diferentes de compressão
- Fornece alta compressão eficaz¹
- Possui uma técnica de aplicação fácil de usar

Composição

- Polimida
- Elastano
- Algodão

Instruções de lavagem



O látex da borracha natural não é um componente do Setopress ou de sua embalagem.

Saiba mais em: www.molnlycke.com.br

Mölnlycke Health Care Brasil
Mölnlycke Health Care Venda de Produtos Médicos Ltda.
Rua Castilho, 392 - Cj. 122 | CEP 04568-010 | São Paulo - SP - Brasil
Telefone Comercial: (11) 3016-8900
E-mail: atendimento.brasil@molnlycke.com | www.molnlycke.com.br

Áreas de uso

A bandagem de alta compressão Setopress® é utilizada no tratamento de úlceras venosas e condições associadas que requerem compressão graduada nos membros inferiores.

ATENÇÃO:

- NÃO aplique Setopress® se houver presença ou suspeita de insuficiência arterial;
- NÃO use a técnica de bandagem em "forma de oito";
- NÃO use em membros com uma circunferência inferior a 18cm



Setopress® - Informações para solicitação

Código	Tamanho
3505	10cm x 3.5m

Registro ANVISA: 80733280025

Embalado individualmente. Cartucho contendo 12 unidades do produto.

Referências:

1. Gould DJ, Cambell S, Newton H, et al, Setopress vs. Elastocrepe in Chronic Venous Ulceration. British Journal of Nursing 1998, 7(2): 66-70, 72-73.
2. Blair et al, Sustained Compression and Healing of Chronic Venous Ulcers, BMJ 1988 297; 1159-64.

